

Opus



Une plateforme radiofréquence dédiée au rajeunissement cutané et le raffermissement de la peau du visage

Non invasif | Temps de récupération court | Sûr et efficace



L'Opportunité **que vous attendiez.**

En utilisant la technologie exclusive de plasma RF fractionnaire d'Alma, Opus™ est la plateforme non invasive ultime pour le resurfacing et le raffermissment de la peau du visage.

Doté de la technologie Opus Plasma™, Opus traite divers problèmes de texture et de qualité de peau, des mineurs aux plus complexes. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une plus grande flexibilité tout en traitant de nombreuses indications, avec des résultats impressionnants.

2 traitements:

Resurfacing de la peau

Lisser la peau et unifier le teint

Avant



Après



Avec l'aimable autorisation du docteur Andrea Ball, DMD | USA

Raffermisssement de la peau

Amélioration significative des imperfections cutanées liées à l'âge, notamment les rides, les ridules et le relâchement cutané

Avant



Après



Avec l'aimable autorisation du docteur Jordan Hollsten, MD, FACS | USA



Je ne connais aucune autre méthode qui soit plus efficace qu'une procédure de resurfaçage ou qui offre des résultats aussi fantastiques. L'Opus est spécial parce qu'il rend le resurfacing accessible à tous. Il est simple, rapide et sûr à réaliser, que ce soit par moi-même ou par mon équipe. De ce point de vue également, il est idéal pour toute clinique

Dr. Jeffrey Hsu, MD, FAAD.



Une analyse plus
approfondie en
matière de
PLASMA




Le principal applicateur Opus, Opus Plasma, comporte de petites électrodes qui déchargent de l'énergie RF à une faible distance de la peau, ionisant les molécules d'air, ce qui entraîne la formation de plasma.

Des micro-étincelles sont créées, provoquant de légères ablations de l'épiderme qui forment des micro-canaux.

Le profil des zones micro thermiques produites peut être contrôlé en fonction de l'effet d'ablation désiré, ce qui accroît la polyvalence de cette technologie.

Contrôle du plasma #1 : Largeur d'ablation

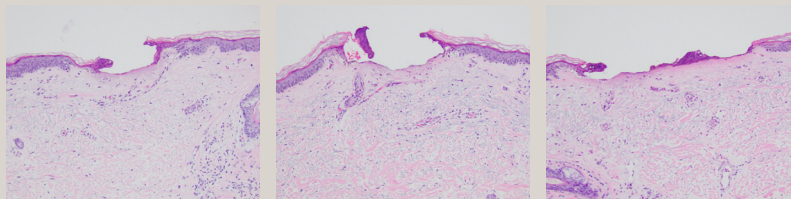


Niveau ablatif 2

Niveau ablatif 3

Niveau ablatif 4

Contrôle du plasma #2 : Profondeur d'ablation

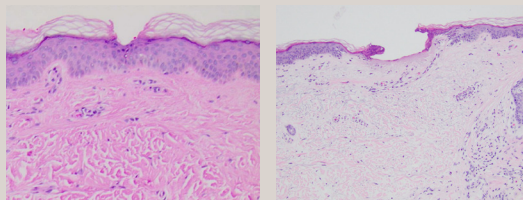

10 W

40 W

Avec l'aimable autorisation du Dr Jeffrey Hsu, MD, FAAD et du Dr Karl Napekoski, MD

Les embouts en plus

En mouvement

Roller



3 rouleaux disponibles avec un nombre de picots pour des intensités différentes d'énergie en fonction de l'indication traitée.

Spark



L'embout idéal pour un traitement rapide, uniforme et complet de resurfacing du visage.

Fixe

Colibri



Une énergie élevée émise par une seule pointe, il cible les zones délicates et difficiles d'accès, comme le contour des yeux et les ridules, avec une grande précision.

Icepick



Convient pour le chauffage dermique ciblé et profond en particulier pour le traitement des cicatrices d'acné et des rides.



Meilleur pour vos patients.

Meilleur pour votre pratique.

01

Personnalisable

En ajustant l'intensité, la profondeur et le plasma, les traitements de rajeunissement de la peau peuvent être personnalisés, en passant de majoritairement ablatifs à majoritairement thermiques, en fonction des besoins du patient.

02

Sûr et efficace

Une solution unique, sûre et efficace pour tous les types de peau, y compris les zones du visage, du cou et du décolleté, ainsi que les peaux s'est amincies avec l'âge.

03

Double embout de connexion

Réduit le temps d'installation et permet de passer facilement d'un applicateur à l'autre durant le traitement.



Applicateurs supplémentaires



UniLarge

Utilisant l'énergie RF unipolaire pour générer une chaleur dermique profonde et stimuler la formation de nouveau collagène, l'applicateur UNILARGE lisse les rides et révèle une peau plus ferme du visage. L'applicateur est équipé d'un thermomètre infrarouge qui permet de maintenir la peau à une température agréable.



UniFace

Doté de la technologie RF UniPolar, associée à un massage rotatif pour une stimulation accrue, cet applicateur est spécialement conçu pour les traitements de raffermisssement de la peau du visage.



Coaxipolar

Le système Xcentuate utilise la radiofréquence par l'intermédiaire de 2 applicateurs, dont la température est réglable, pour remodeler le corps et raffermir la peau sur de grandes zones.



Opus

Le changement est un processus naturel, mais il ne se déroule pas toujours
comme nous le souhaiterions.

C'est là que la technologie d'Alma intervient, en nous redonnant le contrôle.
En tant que leaders dans le domaine de l'esthétique médicale, nous permettons
à des milliers de médecins d'aider des millions de patients à accomplir des
transformations remarquables.

Alma vous permet de fournir le traitement le plus efficace, le plus rapide et le
plus sûr à chaque patient.

Nous mettons à votre disposition notre expertise clinique, notre service dévoué
et notre soutien marketing, ainsi que notre expertise en matière d'esthétique
médicale.

Dans un monde en constante évolution, une chose reste constante : les patients
ont besoin de savoir qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles : avant,
pendant et après leur traitement.

Nos solutions, entre vos mains, rendent cela possible.